

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 6月 20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300912	
作業年月日	2018年 6月 20日		作業時間	: / Hr	
顧客名	西村クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	大阪府大阪市住吉区沢之町1丁目1-16		電話番号	: 06-6608-3777	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2016年 6月 20日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/20、バルブセンサー異常E:214 6回、起動時結水異常E:201 2回

不具合原因、作業内容

コントロール基板不良の為交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 468
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

コントロール基板交換し、正常作動を確認致しました。

装置 情報	交換後運転回数:	17 回	更新(リセット)実施:	未実施	消毒:	412 回	消毒+アル:	198 回
	リークチェック:	0 回	自己洗浄:	1 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:	0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
コントロール基板		☒	1枚	コントロール基板 No.0804510973 → 0329710973

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 6月 20日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥出