

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 6月 21日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                               | 製造番号                                                             | : 100745                                      |
| 作業年月日 | 2018年 6月 21日                             |                               | 作業時間                                                             | : <del>4</del> Hr                             |
| 顧客名   | 明日香村国民健康保険診療所 御中                         |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 奈良県高市郡明日香村立部745                          |                               | 電話番号                                                             | : 0744-54-3005                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2013年 6月 27日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 5回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 480    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0107 / T04c |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ver. 0107 / T01.A ⇒ ver. 0107 / T04c  
safely

|          |               |                         |              |              |
|----------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 20 回 | 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌： 229 回    | 殺菌＋アル： 176 回 |
|          | リークチェック： 5 回  | 自己洗浄： 209 回             | アルコール単独： 2 回 | エア単独： 0 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                       |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.1205/004 → NO.1209/1175             |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO.131102-017 → NO.140805-018          |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、                   |
| タッチパネル       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | 給水フィルターの5点は製造番号なし                              |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      | タッチパネル S/N: 087374H023062 → S/N: 124824c049963 |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 6月 21日

ご署名 萬谷真弓

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 奥田  |