

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 7月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100786
作業年月日	2018年 7月 10日		作業時間	: Hr
顧客名	ふなきクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市西京区大枝北福西町2丁目12-1		電話番号	: 075-335-0220
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 6月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 729 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0107 / TOLA
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレイ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 424 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 12 回	殺菌+アル: 1235 回
	リークチェック: 150 回	自己洗浄: 304 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14121974 → NO. 18013006
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 131126-006 → NO. 140509-010
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
2018 年 7 月 10 日 ご署名 	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山