

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 11月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100503
作業年月日	2018年 11月 6日		作業時間	: 1.5 Hr
顧客名	藤民病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市塩屋3丁目6番2号		電話番号	: 073-445-9881
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 6月 21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 399
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107 / Tol.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

モナクリューブ MC-R220 , ミニ7-DC JWAY 1400WDX (1206265)
専用給排水.

装置情報	交換後運転回数: 10 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 39 回	殺菌+7L: 38 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 11 回	7L単独: 1 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12071108 → NO.10040146
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140729-007 → NO.121025-004
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 11 月 6 日

ご署名

中村 尚美

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田