

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 11月 21日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号	: 300146
作業年月日	2018年 11月 21日	作業時間	: 1.5 Hr
顧客名	矢野医院 御中	ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県紀の川市桃山町調月769-100	電話番号	: 0736-66-2609
販売店		ご担当	様
納入年月日	2013年 11月 22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E205

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 443
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207 / 102BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水ホース次回巻取り時、(排水F-シンク間4mぐらい、現場で交換の判断をする)
分散水栓

装置情報	交換後運転回数: 5 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 118 回	消毒+アル: 188 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 17092850 → NO. 51810013
排水フィルター(新型)		☒	1個	オゾンセンサー NO. 151203-001 → NO. 120821-017
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

和歌山県紀の川市桃山町調月769-100

矢野医院

矢野正和

ご署名

電話 0736-66-2609

責任技術者

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311