

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 31日

|       |                                        |                                                                       |                              |                                            |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                    |                                                                       | 製造番号                         | : 100444                                   |
| 作業年月日 | 2018年 10月 31日                          |                                                                       | 作業時間                         | : Hr                                       |
| 顧客名   | スズキクリニック 御中                            |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                                   |
| 所在地   | 大阪府大阪市東住吉区今川3-12-12 2階                 |                                                                       | 電話番号                         | : 06-6796-7878                             |
| 販売店   |                                        |                                                                       | ご担当                          | 様                                          |
| 納入年月日 | 2012年 4月 17日                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |                                            |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/>          | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 回目                           | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。主電源を何回か入れなおしても。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

|          |                                        |              |                                                   |
|----------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 221   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
|          |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0107/T03D  |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。

|          |          |    |                        |     |            |        |       |
|----------|----------|----|------------------------|-----|------------|--------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： | 0回 | 更新（リセット）実施・ <b>未実施</b> | 殺菌： | 11回        | 殺菌＋7L： | 1010回 |
|          | リークチェック： | 2回 | 自己洗浄：                  | 4回  | 7Lアルコール単独： | 1回     | エア単独： |

| 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                       |
|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン水濃度計 NO, → NO,                              |
| 給水フィルター   |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO, → NO,                               |
| タッチパネル    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし  |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      | タッチパネル S/N: 087374H014405 → S/N: 124824C049984 |
|           |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 スズキ 原 利

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |