

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 8月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300117	
作業年月日	2018年 8月 6日		作業時間	:	Hr
顧客名	たかだ内科医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	滋賀県近江八幡市日吉野町675		電話番号	:	0748-33-1203
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2013年 10月 11日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 284
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒	
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
			プログラムVer	正常	☒	0204 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・中空系給水フィルターセトを設置し 正常作動したので終了。

装置情報	交換後運転回数: 679 回	更新(リセット)実施: ☒ 未実施	消毒: 1255 回	消毒+アル: 4192 回
	リークチェック: 4 回	自己洗浄: 502 回	アルコール単独: 9 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
給水フィルター (中空系 活性炭) 設置		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールキャップ 新型7個		☒	1個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30 年 8 月 6 日

ご署名 たかだ内科医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山