

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018 年 12 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100051	
作業年月日	2018 年 12 月 4 日		作業時間	: Hr	
顧客名	かねみつ内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	京都府京都市右京区太秦下刑部町181番地		電話番号	: 075-873-8686	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2010年 5月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 8 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 524
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/11/28 / 7207回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常	☐ 0107 / T01.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネル交換は有償修理になります。

装置情報	交換後運転回数: 1497 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 3429 回	殺菌+アル: 5275 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 92 回	アルコール単独: 8 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12020921 → NO. 1702613
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 151104-006 → NO. 120829-009
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

由井