

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300473
作業年月日	2018年 12月 11日		作業時間	: Hr
顧客名	公立中央総合病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県中央市山崎町鹿沢93		電話番号	: 0790-62-2410
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2015年 1月 28日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 533
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/3/28 / 6799回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

寒い時、E-210、E-212のエラーが発生しやすいので、早目に部屋を暖めて下さい。
機械のメンテナンスも早目をお願いしたい。

装置情報	交換後運転回数: 1467回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 2780回	消毒+アル: 5486回
	リークチェック: 3833回	自己洗浄: 1204回	アルコール単独: 31回	エア単独: 3回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.15712189 → NO.5811016
排水フィルター	(活性炭)	☒	1個	オゾンセンサ NO.130110-005 → NO.140225-004
給水フィルター	活性炭	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30 年 12 月 11 日

ご署名 栗山盛明

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山