

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 4日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300664
作業年月日	2018年 12月 4日		作業時間	: Hr
顧客名	半田中央病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県相生市旭3丁目2番18号		電話番号	: 0791-22-0656
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 10月 27日	保証期間	内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・12/4(火)『E:210 光量低下異常1』が計3回発生。			
不具合原因、作業内容			
・オゾン水濃度計の不具合が原因です。			
点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 457
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
		プログラムVer	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0207/T02C
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
・オゾン水濃度計を交換し、正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数:	368回	更新(リセット)実施・ 未実施	消毒:	1033回	消毒+アル:	0回
	リークチェック:	0回	自己洗浄:	154回	アルコール単独:	0回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		<input type="checkbox"/>	1セット	オゾン水濃度計 NO,15072067 → NO,10010056
排水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄			
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。			年 月 日
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。			
			ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山