

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 8月 20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301198
作業年月日	2018年 8月 20日		作業時間	: Hr
顧客名	くさか内科医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府堺市北区南長尾町2-1-21		電話番号	: 072-240-9371
販売店			ご担当	様
納入年月日	2017年 8月 29日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シート記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・7/20(金)「E:110」が氷生成異常、8/17(金)「E:302」濃度維持異常、8/17(金)「氷漏れ」が発生。

不具合原因、作業内容

・「E:110」「E:302」は水温の上昇が原因、「氷漏れ」は、吸引アタッチメント方向に向いていたため。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 634
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 36 回	更新(リセット)実施: ☒ 未実施	消毒: 3 回	消毒+アル: 34 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 30 年 8 月 20 日

ご署名

日 月 年

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山