

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 8月 24日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300488
作業年月日	2018年 8月 24日		作業時間	: Hr
顧客名	西原医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府堺市西区平岡町273		電話番号	: 072-271-1701
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 2月 6日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/24(金)「E:214」バルブ異常「E:201」起動時給水異常、各2回発生、タッチパネル不良。

不具合原因、作業内容

・コントロール基板、タッチパネルの不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 175
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T04c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネル、コントロール基板を交換し正常作動したので終了。

装置情報	交換後運転回数: 342 回	更新(リセット)実施: 未実施	消毒: 168 回	消毒+アル: 349 回
	リークチェック: 147 回	自己洗浄: 4 回	アルコール単独: 5 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
コントロール基板		☒	1枚	コントロール基板 No. 1203310972 → No. 0525710973

お客様ご確認署名欄

タッチパネル

1個

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

タッチパネル S/N: 012824C005995 → S/N: 124824C087814
年 月 日

ご署名

西原 淳

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山