

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 1月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301335
作業年月日	2019年 1月 10日		作業時間	: 2 Hr
顧客名	伊奈胃腸科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市本町2丁目42番		電話番号	: 073-428-1717
販売店			ご担当	様
納入年月日	2019年 1月 9日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E:203 2/19

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 376
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/7/5 / 1647回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

③: 医療管理番号

装置情報	交換後運転回数: 1716回	更新(リセット) 実施・未実施	消毒: 2842回	消毒+7L: 521回
	リークチェック: 617回	自己洗浄: 289回	アルコール単独: 100回	エア単独: 0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11060653 → NO. 15072074
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 131102-017 → NO. 140312-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31年 1月 0日

和歌山県和歌山市本町2丁目42番地

ご署名

医療法人 伊奈胃腸科

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

奥田