

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 1月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100786
作業年月日	2019年 1月 29日		作業時間	: Hr
顧客名	ふなきクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市西京区大枝北福西町2丁目12-1		電話番号	: 075-335-0220
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 6月 25日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・タッチパネルが起動しない。				
不具合原因、作業内容				
・タッチパネルの故障が原因です。				
点検項目				
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	ハル数 629
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	2018/7/10 / 1247回	
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒	0107/T03D
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				
・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。				

装置 情報	交換後運転回数：	278回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：	16回	殺菌＋アル：	1509回
	リークチェック：	364回	自己洗浄：	627回	アルコール単独：	0回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
タッチパネル		☒	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
アルコールキャップ 新型ブルー	(無償)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 0873744H023683 → S/N: 124824C045063

お客様ご確認署名欄				
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
年 月 日				
ご署名				

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山