

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 9月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300372	
作業年月日	2018年 9月 6日		作業時間	: / Hr	
顧客名	大浦内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県北葛城郡河合町中山台1丁目1-18		電話番号	: 0745-43-7287	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2014年 9月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 359
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

W-II (1408445), フィルター-部ネジ 1ヶ所締め有り。床下排水、専用給水
 AU-50CB (1452506), EZ580NWII, Advancia

装置 情報	交換後運転回数: 240 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 111 回	消毒+アル: 745 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 700 回	アルコール単独: 4 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10010061 → NO.13051394
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.141125-007 → NO.150224-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 9月 6日

ご署名 田邊 睦江

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田