

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 1月 31日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100550
作業年月日	2019年 1月 31日		作業時間	: Hr
顧客名	三好内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府池田市呉服町3-9 サンロイヤル池田駅前1階		電話番号	: 072-752-2936
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 9月 4日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・ 2018/10/29 (月) ~ 2019/1/29 (火) 『E: 207 オゾン水生成異常』が計13回発生、				
1/29 (火) 『E: 210 光量低下異常1』が計2回発生、1/29 (火) 『E: 212 ランプ切れ異常』が計2回発生。				
不具合原因、作業内容				
・ 『E: 207 オゾン水生成異常』は、内視鏡以外の物を水槽内に多く入れて運転されたのが原因と思われ、				
『E: 210 光量低下異常1』、『E: 212 ランプ切れ異常』は、オゾン水濃度計の不具合が原因です。				
点検項目				
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 401
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.69ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/8/30 / 16370回	
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒	0107/T03D
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				
・ オゾン水濃度計を交換し正常作動したので終了。				

装置 情報	交換後運転回数: 1168回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施	殺菌: 11329回	殺菌+7L: 6209回
	リークチェック: 16319回	自己洗浄: 1423回	アルコール単独: 364回	エア単独: 1回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, 14121971 → NO, 14071864
オゾン水濃度計		☒	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
31 年 2 月 1 日 ご署名 	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山