

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 2月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100572
作業年月日	2019年 2月 15日		作業時間	: / Hr
顧客名	奈良市立都祁診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市都祁白石町1084		電話番号	: 0743-82-1411
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 2月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 6 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 529
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/2/16 / 1744回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 シンク排水、専用給水。
定期点検シール要。GIF-XP260NS, 水一本内視鏡。保管庫あり。
TAF 5000FD (0809020), LUCERA CV-260SL, NBI

装置 情報	交換後運転回数: 184 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 1928 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 331 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10050187 → NO.12040967
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.151001-006 → NO.131126-014
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☐	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル NO. → NO.

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

3/ 年 2 月 15 日

ご署名

小橋

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田