

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 2月 22日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300011	
作業年月日	2019年 2月 22日		作業時間	: 2.5 Hr	
顧客名	南クリニック胃腸肛門科 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県橋本市市脇4-7-6		電話番号	: 0736-34-0171	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2013年 2月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 6 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パル数 222
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/2/2 / 6235回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 音が大きく感じる時があるとのこと。

アルコールを最近変えたとのこと。EC-L600ZP7, EG-L600ZW7, Advancia
定期メンテナンス要。最近お掃除代替使用（リーク発生）。

装置 情報	交換後運転回数: 1213 回	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	消毒: 4537 回	消毒+アル: 311 回
	リークチェック: 6 回	自己洗浄: 1395 回	アルコール単独: 17 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12081141 → NO.13021313
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.120801-032 → NO.150205-001
給水フィルター（中空糸、活性炭）		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31年 2月 22日

ご署名

南 洋 子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田