

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 1日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300653
作業年月日	2018年 10月 1日		作業時間	: Hr
顧客名	杉本クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府門真市垣内町12-32		電話番号	: 06-6115-5086
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 9月 9日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 397
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
		プログラムVer	正常 ☒	0207-T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 933 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 194 回	消毒+7L: 739 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 83 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14031728 → NO. 51809030
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140429-002 → NO. 120821-016
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 10 月 1 日

ご署名

杉本英光

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山