

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 3月 12日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301347
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 3月 12日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2018年 3月 23日
顧客名	中島医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県桜井市阿部311-2		電話番号	: 0744-44-1811
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 420
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207/To4C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

分岐水栓, 専用排水, Advancia, EG-580NW2

装置 情報	交換後運転回数: 208 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 20 回	消毒+アル: 1A9 回
	リークチェック: 1A8 回	自己洗浄: 1A8 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 170J0019 ☒	1個
交換後 No. 1108 0758	
オゾンセンサー 161018-007 ☒	1個
交換後 No. 120710-028	
給水フィルター ☐	1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒	1個
接続コネクタ: 水槽側 ☐	1個
接続コネクタ: チューブ側 ☐	1個
オゾン水濃度計用フィルタ ☐	1個
排水フィルター ☐	1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒	1個
エアフィルター ☐	1個
水フィルター ☐	1個
吸盤 ☒	1個
マニホールド周辺チューブ ☐	1セット
☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31年 3月 12日

中島 瑞夫

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田