

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100055
作業年月日	2018年 10月 23日		作業時間	: Hr
顧客名	大塚医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市右京区梅津前田町65-4		電話番号	: 075-881-3088
販売店			ご担当	様
納入年月日	2010年 7月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 8 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 414
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T01A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネルの交換は有償になります。

装置情報	交換後運転回数: 171 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 31 回	殺菌+7L: 1256 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 1384 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12091180 → NO. 51809065
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 141216-005 → NO. 140905-015
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 10 月 23 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井