

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 16日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300683
作業年月日	2018年 10月 16日		作業時間	: Hr
顧客名	やまぐち医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市左京区岩倉忠在地町541		電話番号	: 075-701-1104
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2015年 10月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 640
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T02c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 234 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 206 回	消毒+7L: 473 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	7Lアルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO.1302/319 → NO.15082087
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.121002-015 → NO.130723-019
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

30.10.16
年 月 日
〒606-0021京都市左京区岩倉忠在地町541
医療法人 陽光会やまぐち医院
TEL (075) 701-1104

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 山田 陽弘
作業者 由井