

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300009
作業年月日	2018年 10月 9日		作業時間	: Hr
顧客名	クリニック内藤 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県伊丹市中野西2丁目207		電話番号	: 072-777-7700
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 12月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 194
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0202 / T4C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し 正常作動したにて終了。

装置 情報	交換後運転回数: 0 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 73 回	消毒+アル: 942 回
	リークチェック: 714 回	自己洗浄: 429 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル: S/N: 08B74H025337 → S/N: 124824C050216

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

玄内 淳子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山