

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 3月 22日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300257
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 3月 22日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 3月 31日
顧客名	北住医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	京都府京都市伏見区向島本丸町20/A-ス7-A-ク観月橋1階		電話番号 : 075-612-5217
作業区分	有償 ☐	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 Hr
			定期点検シール記入 ☒
			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 485
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/3/12 / 740回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207/T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 177 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 14 回	消毒+アル: 903 回
	リークチェック: 909 回	自己洗浄: 782 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 14051772		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 151109-014		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空系・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井