

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 11月 28日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300661
作業年月日	2018年 11月 28日		作業時間	: / Hr
顧客名	ふじたクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県田辺市秋津町158-4		電話番号	: 0739-34-3034
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 11月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E: 202

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 455
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0-71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ青。専用給排水。メディカルグレード MD-18 (エヤマ)
EG-590MG, EG-550WR, アドバンシア

装置情報	交換後運転回数: 412 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 141 回	消毒+アル: 229 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 116 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14051773 → NO.12040993
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.1210002-012 → NO.140426-006
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成 30 年 11 月 28 日

藤田 繁雄 (藤田)

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田