

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 11月 29日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300091
作業年月日	2018年 11月 29日		作業時間	: Hr
顧客名	新神戸ドック健診クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	神戸市中央区熊内町7丁目6-1 ジー・エル・新神戸タワー2階		電話番号	: 078-261-6736
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 9月 25日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11/22(木)より11/29(木)まで「E:115 オゾン水異常」が計23回発生。

不具合原因、作業内容

・コントロール基板の不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日／交換回数	2017/8/23 / 1429回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常 ☒	0207 / T62BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・コントロール基板を交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 306 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 853 回	消毒+アル: 1625 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1627 回	アルコール単独: 23 回	エア単独: 43 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
コントロール基板		☒	1枚	コントロール基板・NO.11022/0970 → NO.05257/0973

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

狩野

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山