

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 6月 4日

|                               |                                                                                                                          |          |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                                                             | Ver. 3.1 | 製造番号 : 301201       |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                                                                 | Ver. 3.1 | 作業年月日 : 2019年 6月 4日 |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                                     | Ver. 1.0 | 納入年月日 : 2017年 4月 4日 |
| 顧客名                           | 馬野クリニック 御中                                                                                                               |          | ご担当 : 院長先生 様        |
| 所在地                           | 大阪府阪南市鳥取中159-1                                                                                                           |          | 電話番号 : 072-447-8161 |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/> 作業時間 Hr                 |          |                     |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |          |                     |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>   |          |                     |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

## 不具合原因、作業内容

### 点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                      |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 385         |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm      |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   |    |                                                      |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207 / T04C |

## 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |                 |                                                      |              |              |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1196 回 | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒: 458 回    | 消毒+アル: 789 回 |
|          | リークチェック: 1187 回 | 自己洗浄: 1 回                                            | アルコール単独: 1 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 110/0532   |                                        |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 130/11-018 |                                        |
| 給水フィルター            | <input type="checkbox"/> 1本            |
| (中空糸・活性炭・糸巻)       |                                        |

| 交換部品名称        | 交換・数量                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 接続コネクタ: チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| (従来型・新型)      |                                        |

| 交換部品名称       | 交換・数量                                    |
|--------------|------------------------------------------|
| 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |
| エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個              |
| 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個              |
| 吸盤           | <input type="checkbox"/> 1個              |
| マニホールド周辺チューブ | <input checked="" type="checkbox"/> 1セット |
|              | <input type="checkbox"/>                 |

### お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

1 年 6 月 4 日  
馬野 孝一

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山