

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 4日

|       |                                        |                                                                       |                              |                                            |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                   |                                                                       | 製造番号                         | : 300183                                   |
| 作業年月日 | 2018年 12月 4日                           |                                                                       | 作業時間                         | : Hr                                       |
| 顧客名   | 青山医院 御中                                |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                                   |
| 所在地   | 兵庫県神戸市東灘区甲南町1-4-18-101                 |                                                                       | 電話番号                         | : 078-452-1005                             |
| 販売店   |                                        |                                                                       | ご担当                          | 様                                          |
| 納入年月日 | 2014年 1月 20日                           | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                          |                                            |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/>          | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 回目                           | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/3(月)「E:III 排水注意」が発生。

不具合原因、作業内容

排水フィルターの目詰まりが原因です。

点検項目

|          |                                        |              |                                        |              |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | バルブ数 519     |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 履歴 0.72 ppm  |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   |                                        |              |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 0204 / T02BV |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水フィルターを新型に交換し、正常作動したので終了。

|          |               |                |               |             |
|----------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 156回 | 更新(リセット)実施・未実施 | 消毒: 6回        | 消毒+7L: 888回 |
|          | リークチェック: 0回   | 自己洗浄: 775回     | 7Lアルコール単独: 0回 | エア単独: 2回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                     |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン水濃度計 NO, → NO,            |
| 排水フィルター      | 新型    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO, → NO,            |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし    |
| アルコールキャップ    | 7L    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   |                              |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30年 12月 4日

ご署名 青山芳子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |