

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301060
作業年月日	2018年 12月 10日		作業時間	: Hr
顧客名	村川医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市此花区伝法2丁目4番29号		電話番号	: 06-6463-1222
販売店			ご担当	様
納入年月日	2016年 12月 27日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
不具合原因、作業内容				
点検項目				
フタロック	正常	☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 435
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				

装置 情報	交換後運転回数:	10 / 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒:	64 / 回	消毒+アル:	140 / 回
	リークチェック:	0 / 回	自己洗浄:	2 / 回	アルコール単独:	0 / 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13041374 → NO. 14021699
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO. 140305-001 → NO. 140227-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	30年 12月 10日 藤田 泰子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山