

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 12日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300698                                      |
| 作業年月日 | 2018年 12月 12日                            |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                          |
| 顧客名   | うさみクリニック 御中                              |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目19-9                     |                               | 電話番号                                                             | : 06-6626-6533                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2015年 12月 2日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 3回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |                                        |              |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                        |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 631    |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   |                                                    |
| 殺菌槽 LED                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0207 / T02C |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |

|          |               |                                                     |              |            |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 56 回 | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒: 175 回    | 消毒+アル: 0 回 |
|          | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 1 回                                           | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                           |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 10010100 → NO. 51811019    |
| 排水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO. 140429-001 → NO. 121002-026 |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、           |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし              |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                        |

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  |
| <div style="text-align: right;">             30 年 12 月 12 日<br/>             ご署名 新鋭工業           </div>                      |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |