

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 14日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301149
作業年月日	2018年 12月 14日		作業時間	: Hr
顧客名	草場消化器クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市中京区西ノ京下合町11島津プラザビル4階		電話番号	: 075-822-0013
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2017年 6月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 742
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/6/1 / 3177回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1535 回	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 3837 回	消毒+7L: 875 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 357 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14071851 → NO. 170J0005
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 140701-011 → NO. 121002-012
給水フィルター	(活性炭)	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
30 年 12 月 14 日 ご署名 田口 はるみ	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山