

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 12月 11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300257
作業年月日	2018年 12月 11日		作業時間	: Hr
顧客名	北住医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市伏見区向島本丸町20ア-ス アーク観月橋 1階		電話番号	: 075-612-5217
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2014年 3月 31日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル故障

不具合原因、作業内容

タッチパネル+コントロール基盤の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 333
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 135 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 13 回	消毒+アル: 862 回
	リークチェック: 868 回	自己洗浄: 744 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	コントロール基盤 NO. 0406710973 → NO. 0404310971
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	タッチパネル NO. 087374H028714 → NO. 124824C051665
コントロール基盤		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☒	1個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2018年 12月 11 日

ご署名

北住清治

北住

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

由井

Ver. 3.1