

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019年 3月 14日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300490
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 3月 14日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 3月 11日
顧客名	天神橋みやたけクリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市北区天神橋3-2-13 大阪膳写館ビル2階		電話番号 : 06-6809-7295
作業区分	有償 ☐ 無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

スタート(消毒)してすぐにエラーが出て停止する ⇒ エラー内容: 光量低下, ランプ切れ異常.

不具合原因、作業内容

オゾン濃度計の不具合 ⇒ 当該部品と交換.

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 706
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数		/
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☐ Ver. /

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

不具合部品交換後は正常運転を確認
未消毒内視鏡 2本を消毒(アルコール)

装置 情報	交換後運転回数: 21 回	更新(リセット)実施 ☒ 未実施	消毒: 177 回	消毒+アル: 1155 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 7 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 51903127	
オゾンセンサー ☐ 1個	
交換後 No.	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☐ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☐ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☐ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☐ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 3月 14日

ご署名

宮竹 英希

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田