

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190705

発行日: 2019 年 3 月 7 日

販売名 / サービスマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	製造番号 S00209 作業年月日 2019 年 7 月 5 日 作業時間 Hr
顧客名	吹上ワリニフ 様	TEL: 073-423-2700
所在地	和歌山市 吹上 2-5-28	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 出張・引取 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	定期点検シール記入 ☐ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

納品後フォロー

6/22 11:26, 12:41 消毒時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容

供給水圧は 0.34 ~ 0.40 MPa でした (仕様は 0.8 MPa 以下)

点検項目

フタロック	正常 ☒	0.2 MPa	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	500 L x 1 時 (希)	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐		オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 903
オゾンセンサ	正常 ☐		排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	減圧弁設置	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐		排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐		オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐	清掃 ☐	電源コード	正常 ☐ 2P 延長コード
トレー	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / T11.4

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

水圧は地域、季節、時間によって大きく変動します。
減圧弁を設置したので様子を見て下さい。また、排水栓の引っかけも留意下さい。

装置情報	交換後運転回数: 14	更新 (リセット) 実施: 未実施	殺菌/消毒: 6 / 3	殺菌/消毒+7L: 8 / 8
	リークチェック: 0	自己洗浄: 4	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ; チューブ側	☐		☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 5 日

ご署名

中井 裕之

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

2019.7.5

(中井)

作業者

(中井)