

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 1月 9日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300184                                      |
| 作業年月日 | 2019年 1月 9日                              |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                          |
| 顧客名   | 宮崎クリニック 御中                               |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 兵庫県丹波市柏原町南多田686-1                        |                               | 電話番号                                                             | : 0795-73-5501                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2014年 2月 12日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 5回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                    |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 494    |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2017/2/21 / 2414回                                  |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0207 / T04C |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |                |                                                     |                |               |
|------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 688 回 | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒: 1272 回     | 消毒+7L: 2584 回 |
|      | リークチェック: 4 回   | 自己洗浄: 1360 回                                        | 7Lアルコール単独: 4 回 | エア単独: 0 回     |

| 交換部品名称              | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                            |
|---------------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 定期交換部品セット           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 16022235 → NO. 15092121     |
| 排水フィルター             |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 151203-002 → NO. 140604-002 |
| 給水フィルター             |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、            |
| マニホールド周辺チューブ        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし               |
| タッチパネル アルコールキャップ 7L |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | タッチパネル NO. → NO.                        |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

431 年 1 月 9 日

ご署名

宮崎直之

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山