

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 1月 16日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300736	
作業年月日	2019年 1月 16日		作業時間	: / Hr	
顧客名	浦医院・胃腸・肛門科 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌山市黒田1丁目1-10クリニック上林1階		電話番号	: 073-475-1113	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2016年 1月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 3 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 415
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/1/10 / 1271回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 CF-Q260AL, GIF-XQ240, GIF-XQ200, 代2A
 オゾンセンサー フロム右ネジ穴不良→次回作業注意。
 分岐水栓, LUCERA CV-260, SSU-2, ショック排水。

装置 情報	交換後運転回数: 581 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 616 回	消毒+アル: 1246 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 683 回	アルコール単独: 16 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 15011999 → NO. 14021690
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140227-004 NO. 120515-029
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31 年 1 月 16 日

ご署名 加山由紀子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田