

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 8月 6日

|                              |                                                          |                               |                               |                |                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 販売名<br>サビ・スマニアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>             | Ver. 3.1                      | 製造番号                          | : 300913       |                                     |
|                              | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | Ver. 3.1                      | 作業年月日                         | : 2019年 8月 6日  |                                     |
|                              | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>     | Ver. 1.0                      | 納入年月日                         | : 2016年 7月 13日 |                                     |
| 顧客名                          | 中谷病院 御中                                                  |                               |                               | ご担当            | : 院長先生 様                            |
| 所在地                          | 和歌山県和歌山市鳴神123番地の1                                        |                               |                               | 電話番号           | : 073-471-3111                      |
| 作業区分                         | 有償 <input checked="" type="checkbox"/>                   | 無償 <input type="checkbox"/>   | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間           | 2 Hr                                |
|                              | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>                 | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 3回目                           | 定期点検シート記入      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取                        | 修理 <input type="checkbox"/>                              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付         | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾン生成異常 E207, オゾン生成注意 E110, 濃度制御注意 E109  
濃度維持異常 E302, 流量低下注意 E108  
オゾン水生成異常 E215, オゾンサイザー故障 E102 (1/31)

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                         |
|----------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 592         |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.65 ppm      |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | /                                                       |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207 / T02C |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

アルコール: 新清アル[ヨシダ] ヨシダ製薬, LASE REO 専用給排水.  
CF-Q260A2, EG-L600WR7, EG-L580NW7, EG-L580NW,

|    |                 |                  |              |               |
|----|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 2026 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 306 回    | 消毒+アル: 4922 回 |
| 情報 | リークチェック: 7 回    | 自己洗浄: 848 回      | アルコール単独: 2 回 | エア単独: 2 回     |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 16042293   |                                        |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 170403-002 |                                        |
| 給水フィルター            | <input checked="" type="checkbox"/> 2本 |
| (中空糸・活性炭 糸巻)       |                                        |

| 交換部品名称        | 交換・数量                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: 水槽側   | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| (従来型・新型)      |                                        |

| 交換部品名称       | 交換・数量                                    |
|--------------|------------------------------------------|
| 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |
| エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個              |
| 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個              |
| 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |
| マニホールド周辺チューブ | <input checked="" type="checkbox"/> 1セット |
|              | <input type="checkbox"/>                 |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 8月 6日

ご署名

林 美里



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 奥田  |