

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 7月 3日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300030
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 7月 3日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 7月 18日
顧客名	山縣クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県丹波市市島町上竹田1099-1		電話番号 : 0795-80-3675
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	6回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守. 7ヶ月の交換. 排水フィルターセト撤去.

不具合原因、作業内容

. 7ヶ月の交換. S/N: 087374H025477 → S/N: 124824C052621.

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 495
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日／交換回数	2018/7/18 / 4190回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0204 T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

保守. 7ヶ月の交換. 排水フィルターセト撤去し 正常作動したので終了.

装置 情報	交換後運転回数: 691 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 185 回	消毒+アル: 4696 回
	リークチェック: 4535 回	自己洗浄: 1689 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 16032263		接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 160212-013		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター セト撤去	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		アルコール拭き下し	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 7 月 3 日

ご署名

大西 陽子

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山