

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 7月 16日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100309
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 7月 16日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2015年 2月 9日
顧客名	しらはま内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市港区八幡屋1-3-19		電話番号	: 06-6573-6322
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr	
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	回目	定期点検シート記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タンクパネルが起動しない。

不具合原因、作業内容

・タンクパネルの故障が原因です。タンクパネルを交換。
タンクパネル・S/N: 087374H012180 → S/N: 124824C052594.

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 448
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2015/2/3 / 182回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / T03D	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・タンクパネルを交換し正常作動したのを終了。

装置 情報	交換後運転回数： 0 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 18 回	消毒＋アル： 783 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 144 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		アルコール拭き拭き	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 白波 健太郎

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山