

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 3月 12日

|                               |                                                                                                          |                                            |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                                             | Ver. 3.1                                   | 製造番号 : 300158        |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Ver. 3.1                                   | 作業年月日 : 2019年 3月 12日 |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                     | Ver. 1.0                                   | 納入年月日 : 2014年 1月 14日 |
| 顧客名                           | なべたに内科クリニック 御中                                                                                           |                                            | ご担当 : 院長先生 様         |
| 所在地                           | 兵庫県姫路市飾西492-1                                                                                            |                                            | 電話番号 : 079-266-1515  |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/> 作業時間 Hr |                                            |                      |
|                               | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 回目                                           | 定期点検シート記入 <input type="checkbox"/>         |                      |
| 出張・引取                         | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>        | 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/> |                      |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッパパネルが起動しない。

不具合原因、作業内容

・タッパパネルの故障が原因です。

点検項目

|          |    |                                     |                  |                 |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン            | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作        | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン        | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン          | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン            | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度            | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動           | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード            | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類          | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ     | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数       | 2019/1/9 / 386回 |                                     |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン     | 正常              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |    |                                     | 履歴 0.70 ppm      |                 |                                     |
|          |    |                                     | Ver. 0204 / TO4C |                 |                                     |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・タッパパネルを交換し正常作動したので終了。 S/N: 087374H/027636 → S/N: 124B24C05/299.

|    |               |                              |              |              |
|----|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 10 回 | 更新 (リセット) 実施: <del>未実施</del> | 消毒: 7 回      | 消毒+アル: 389 回 |
| 情報 | リークチェック: 1 回  | 自己洗浄: 4 回                    | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称       | 交換・数量                       | 交換部品名称        | 交換・数量                       | 交換部品名称       | 交換・数量                                  |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計      | <input type="checkbox"/> 1個 | オゾン分解触媒       | <input type="checkbox"/> 1個 | 排水栓          | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 交換後 No.      |                             | 接続コネクタ: 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個 | エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個            |
| オゾンセンサー      | <input type="checkbox"/> 1個 | 接続コネクタ: チューブ側 | <input type="checkbox"/> 1個 | 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 交換後 No.      |                             | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input type="checkbox"/> 1個 | 吸盤           | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 給水フィルター      | <input type="checkbox"/> 1本 | 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個 | マニホールド周辺チューブ | <input type="checkbox"/> 1セット          |
| (中空糸・活性炭・糸巻) |                             | (従来型・新型)      |                             | タッパパネル       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

銅谷重子

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山