

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 8月 2日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301346	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 8月 2日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2018年 3月 9日	
顧客名	ひだかクリニック乳腺・消化器外科 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目2-17-101			電話番号	: 078-531-5055
作業区分	有償 ☐	無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間	Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/31(水) 8/2(金) 「E:210 光量低下異常」, 「E:212 アンペア切れ異常」が計2回発生。

不具合原因、作業内容

・オゾン水濃度計の不具合が原因です。

オゾン水濃度計・No. 170J0018 → No. 17042731

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数		
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒

バルブ数 574

履歴 0.68 ppm

Ver. 0207 / TAC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・オゾン水濃度計を交換し正常作動したので終了。

装置	交換後運転回数: 467 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 111 回	消毒+アル: 357 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 223 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No. 17042731		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 8月 2日

ご署名

日高敏晴

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山