

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 2月 12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300192
作業年月日	2019年 2月 12日		作業時間	: Hr
顧客名	北村診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市大正区泉尾3-3-22		電話番号	: 06-6551-2250
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2014年 3月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日／交換回数	2017/3/3 / 1448回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常 ☒	0204 / T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 454 回	更新（リセット）実施・未実施 ☒	消毒: 211 回	消毒+7L: 2198 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 889 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13051422 → NO.51811096
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾンセンサ NO.130109-023 → NO.140804-012
アルコールキャップ	アルコール	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
排水フィルター新設セット	撤去	☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

13 / 年 2月 12日

北村 孝一

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山