

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 2月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100574
作業年月日	2019年 2月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	森クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府羽曳野市島泉1丁目21-6がらんこにっせん1階		電話番号	: 0729-30-2755
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 3月 4日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 501
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/3/1 / 446回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0107 / TEL A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数:	95 回	更新(リセット) (実施)・未実施	殺菌:	257 回	殺菌+7L:	376 回
	リークチェック:	0 回	自己洗浄:	368 回	アルコール単独:	1 回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 16082433 → NO. 57811098
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾンセンサ NO. 150309-010 → NO. 151126-010
アルコールキャップ	71L~	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
1131年 2月 15日 署名 森 巨平	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山