

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 2月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300013
作業年月日	2019年 2月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	ひきまクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府羽曳野市栄町4-10パレ・フラックス2階		電話番号	: 072-950-4880
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 2月 5日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	5回目 定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ	☐	その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 653
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/2/2 / 669回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0202 / To2.B
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数：123 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒：426 回	消毒＋アル：366 回
	リークチェック：2 回	自己洗浄：132 回	アルコール単独：1 回	エア単独：0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10070338 → NO. 51811097
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾンセンサ NO. 140219-020 → NO. 150313-003
アルコールキャップ	7"ル-	☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
排水フィルターセット	概去	☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	ご署名 尾市

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山