

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 2月 8日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300410
作業年月日	2019年 2月 8日		作業時間	: Hr
顧客名	ちばクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府高槻市宮野町21-17		電話番号	: 072-675-6013
販売店			ご担当	様
納入年月日	2014年 12月 8日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・1/23（水）『E: 402 排水異常2』1回、2/4（月）『E: 100 オゾンセンサ故障』5回、
『E: 113 酸素圧力スイッチ異常』1回、『E: 114 圧力スイッチ異常』1回、『E: 205 オーバーフロー異常』1回、発生。

不具合原因、作業内容

・コントロール基板の不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 410
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/2/8 / 163回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207/T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・コントロール基板を交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数：	4回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	8回	消毒＋アル：	155回
	リークチェック：	0回	自己洗浄：	10回	アルコール単独：	0回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
コントロール基板		☒	1枚	オゾンセンサ NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
アルコールキャップ 新型ブルー		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
排水フィルターセット	撤去	☒	1セット	コントロール基板 NO, 1004310971 → NO, 0522710973

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 2月 18日

ご署名

篠原

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山