

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 1月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0			製造番号	: 100053
作業年月日	2019年 1月 15日			作業時間	: Hr
顧客名	岡村医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町19-1			電話番号	: 075-751-1981
販売店				ご担当	 様
納入年月日	2010年 6月 22日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 400
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2017/1/16 / 247回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / T01.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タンクの交換は有償修理となります。
アルコールギャップ交換。

装置情報	交換後運転回数: 32 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施	殺菌: 25 回	殺菌+アル: 296 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 72 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13121622 → NO.14091928
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.120828-014 → NO.140805-017
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成31 年 1 月 15 日

ご署名 岡村 晋郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井