

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 17日

販売名 サビ・スミ・ニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301148
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 4月 17日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2017年 5月 17日
顧客名	やまだクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県伊丹市西台1丁目5-7伊丹ファミリーハイツ1階		電話番号	: 072-771-8778
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 346
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒	
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数			
殺菌槽 LED	正常	☒	運転マニホールドバージョン	正常	☒	Ver. 0207 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 794 回	更新 (リセット) (実施)・未実施	消毒: 1632 回	消毒+アル: 36 回
情報	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 48 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 13031338	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 140905-019	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 17 日

ご署名

中山 吉也

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山