

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 18日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300408
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 11月 18日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 11月 27日
顧客名	中谷内科医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県五條市野原西4丁目9番25号		電話番号	: 0747-22-3683
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 598
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	待機時主電源ON、専用給排水 自己洗浄に付いての確認。アルコール蓋 白→青、 EG-580NW2, Advancia, ミニ7W-E
----------------------------	--

装置	交換後運転回数: 254 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 271 回	消毒+アル: 256 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒	1個
交換後 No. 180/3030	
オゾンセンサー ☒	1個
交換後 No. 140905-021	
給水フィルター ☐	1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒	1個
接続コネクタ; 水槽側 ☐	1個
接続コネクタ; チューブ側 ☐	1個
オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1個
排水フィルター ☐	1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒	1個
エアフィルター ☐	1個
水フィルター ☐	1個
吸盤 ☒	1個
マニホールド周辺チューブ ☒	1セット
☐	

お客様ご確認署名欄	2019年 11月 18日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 中谷 孝宏	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田