

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 5日

|                               |                                                                                                          |                                               |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                                             | Ver. 3.1                                      | 製造番号 : 300133         |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Ver. 3.1                                      | 作業年月日 : 2019年 11月 5日  |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                     | Ver. 1.0                                      | 納入年月日 : 2013年 11月 11日 |
| 顧客名                           | 由井クリニック 御中                                                                                               |                                               | ご担当 : 院長先生 様          |
| 所在地                           | 兵庫県神戸市西区梶台5丁目10番2号 西神センタービル3階                                                                            |                                               | 電話番号 : 078-991-5858   |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/> 作業時間 Hr |                                               |                       |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6回目                               | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |                   |                                                       |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 735          |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm       |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2018/11/14 / 403回 |                                                       |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0204 / T02BV |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |               |                |              |              |
|----------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 47 回 | 更新(リセット)実施・未実施 | 消毒: 13 回     | 消毒+アル: 437 回 |
|          | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 419 回    | アルコール単独: 1 回 | エア単独: 6 回    |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 17092834   |                                        |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 170912-004 |                                        |
| 給水フィルター            | <input type="checkbox"/> 1本            |
| (中空糸・活性炭・糸巻)       |                                        |

| 交換部品名称        | 交換・数量                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: 水槽側   | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 接続コネクタ: チューブ側 | <input type="checkbox"/> 1個            |
| オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| (従来型・新型)      |                                        |

| 交換部品名称          | 交換・数量                                  |
|-----------------|----------------------------------------|
| 排水栓             | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| エアフィルター         | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 水フィルター          | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 吸盤              | <input type="checkbox"/> 1個            |
| マニホールド周辺チューブ    | <input type="checkbox"/> 1セット          |
| アルコール拭き取り用ティッシュ | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

石原 理恵

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山