

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2019年 11月 18日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300407	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 11月 18日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 11月 19日	
顧客名	あさくらクリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県桜井市黒崎646-1			電話番号	: 0744-46-1114
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr	
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

10/9 E: J02 濃度維持異常

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 531
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/11/27 / 3739回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

待機時主電源 ON. 専用給排水、
GIF-H190N, EG-380 NW2, PCF-H1900, EVIS EXTRA II, ミニ7W-II
Advancia

装置	交換後運転回数: 1097 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 2821 回	消毒+アル: 2015 回
情報	リークチェック: 3 回	自己洗浄: 172 回	アルコール単独: 7 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No.	1512 2211
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No.	170418-002
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R / 年 11 月 18 日

ご署名

山村和美

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田